


# Customy Vision

## Instrukcja Instalacji Oprogramowania

Wersja CV-SII-2022.01-PL

Data wydania 2022.06.03

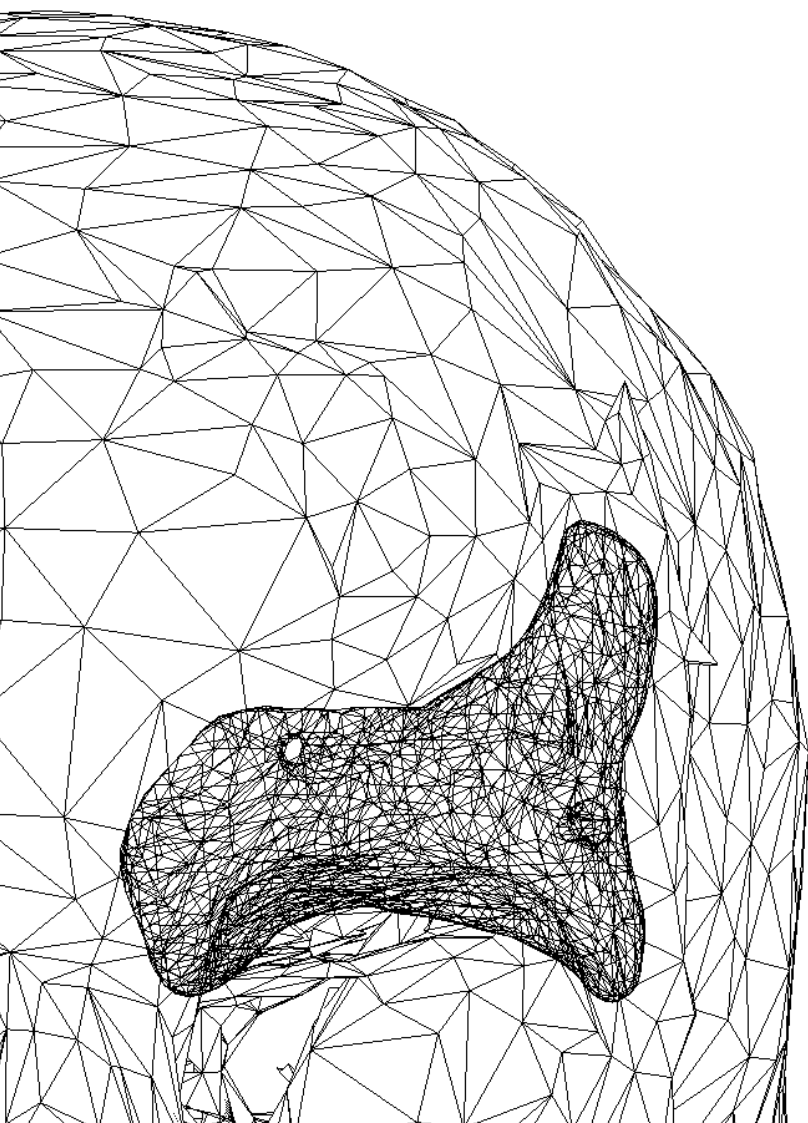

## Dane kontaktowe producenta

Customy Vision 1.1.0 Oprogramowanie wyprodukowane w czerwcu 2022 przez:



**Smart Labs Sp. z o.o.**

ul. Metalowców 13

41-500 Chorzów, Poland

email: [contact@customy.eu](mailto:contact@customy.eu)

[www.customy.eu](http://www.customy.eu)

## Spis treści

1.	Wstęp.....	3
2.	Wymagania systemowe.....	3
3.	Instalacja w środowisku macOS.....	3
3.1.	Proces instalacji.....	3
3.2.	Weryfikacja procesu instalacji.....	7
4.	Instalacja w środowisku Windows.....	9
4.1.	Proces instalacji.....	9
4.2.	Weryfikacja procesu instalacji.....	13
5.	Informacje dodatkowe.....	14

## 1. Wstęp

W niniejszej Instrukcji Instalacji Oprogramowania zawarte zostały scenariusze instalacji oprogramowania Customy Vision na systemach operacyjnych macOS oraz Windows.

## 2. Wymagania systemowe

Przed rozpoczęciem instalacji należy zweryfikować czy system operacyjny oraz sprzęt komputerowy spełniają minimalne wymagania. Wymagania znajdują się w Instrukcji Użycia Oprogramowania (IFU).


## 3. Instalacja w środowisku macOS

### 3.1. Proces instalacji

Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, jeśli chcesz zainstalować Customy Vision na systemie macOS.

#### 1. Pobierz plik instalacyjny


Aby rozpocząć, przejdź do podanego linku instalacyjnego i pobierz instalator Customy Vision. Domyślnie plik instalacyjny zostanie zapisany na komputerze w formacie *.dmg* w folderze Downloads pod nazwą *CustomyVisionSetup.dmg*. Aby uruchomić instalację, otwórz plik *CustomyVisionSetup.dmg* klikając na niego prawym przyciskiem myszy i wybierając opcje *Open* z menu kontekstowego.

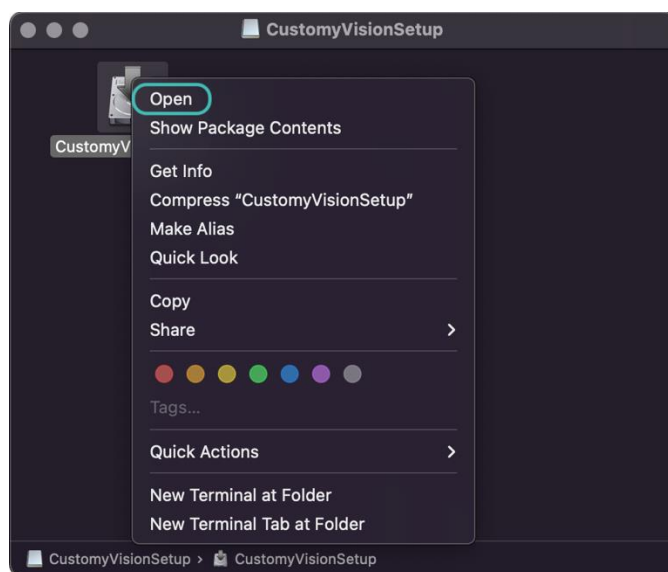

Zdjęcie 1. Opcje pliku instalacyjnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy

#### 2. Komunikaty bezpieczeństwa

W zależności od ustawień bezpieczeństwa systemu macOS, podczas uruchomienia instalatora może pojawić się komunikat widoczny na Zdjęcie 2. Jeśli komunikat ten pojawi się kliknij *Open* aby móc kontynuować proces instalacji.

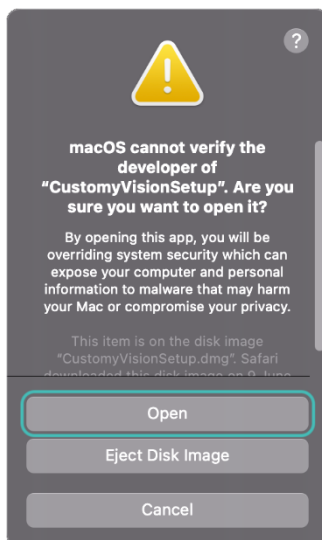


Zdjęcie 2. Komunikat bezpieczeństwa – macOS

### 3. Asystent instalacji

Asystent instalacji Customy Vision powinien otworzyć się automatycznie. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować oprogramowanie:

#### Krok 1. Konfiguracja – Customy Vision


Gdy otworzy się okno Customy Vision Installer Setup, pokazane na Zdjęcie 3, kliknij *Continue*.

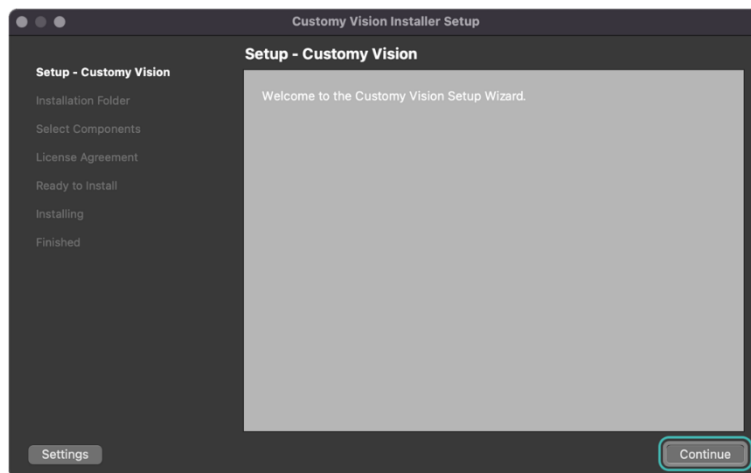

Zdjęcie 3. Krok 1: Konfiguracja – Customy Vision – macOS

#### Krok 2. Folder instalacji


W kroku tym należy wybrać miejsce instalacji Customy Vision. Domyślnie aplikacja zostanie zapisana w folderze `/Users/userName/Applications/Customy`. W celu zmiany lokalizacji należy kliknąć *Browse* i wskazać określone miejsce i następnie kliknąć *Continue*.

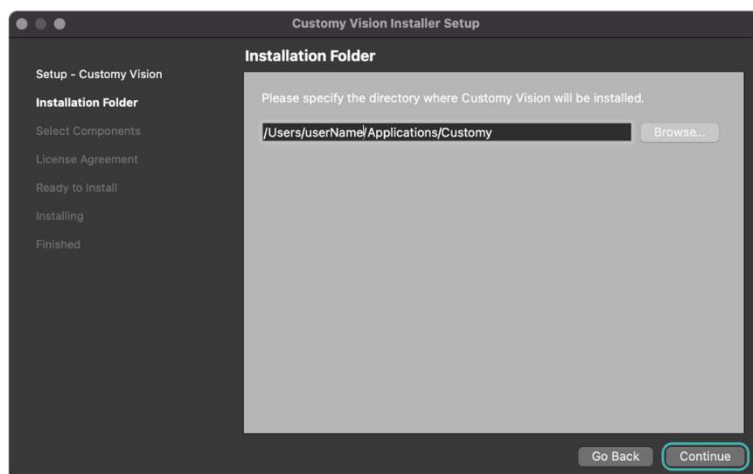

Zdjęcie 4. Krok 2: Folder Instalacji– macOS

### Krok 3. Wybierz elementy


W następnym kroku wyświetlone są wszystkie elementy, które zostaną zainstalowane. Kliknij *Continue*, aby przejść do następnego kroku.

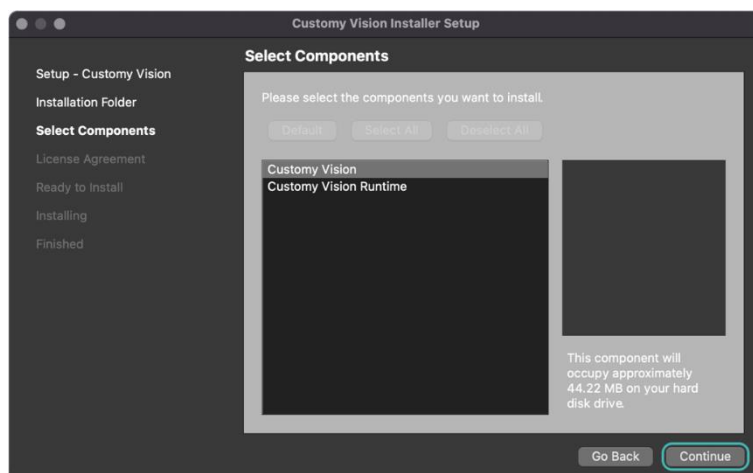

Zdjęcie 5. Krok 3: Wybór elementów– macOS

### Krok 4. Umowa licencyjna


Przeczytaj dokładnie *End-User Software License Agreement*. Aby zaakceptować warunki umowy zaznacz opcję *I accept the license* i kliknij *Continue*.

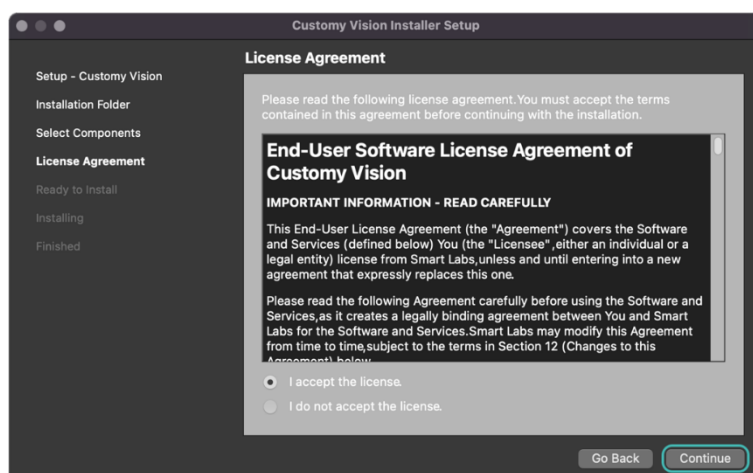

Zdjęcie 6. Krok 4: Umowa licencyjna – macOS

**Krok 5.** Gotowy do instalacji


W kroku tym wyświetlona zostanie wiadomość widoczna na Zdjęciu 7, informująca o gotowości instalacji oraz ilości pamięci jaka zostanie wykorzystana. Aby rozpocząć proces instalacji kliknij *Install*.

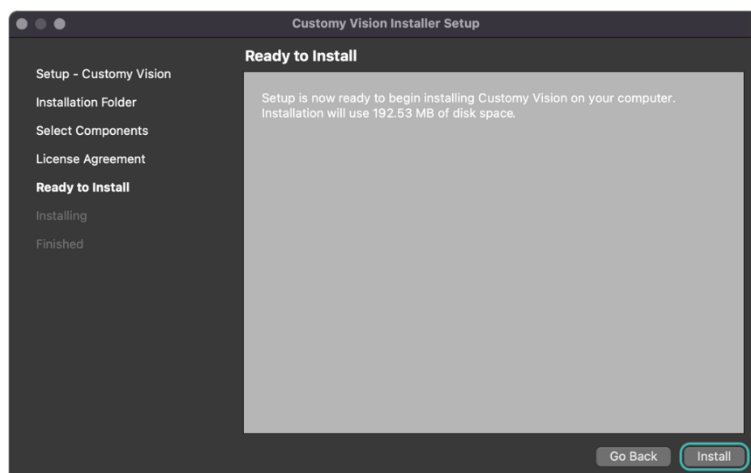

Zdjęcie 7. Krok 5: Gotowość do instalacji – macOS

**Krok 6.** Instalacja


Proces instalacji powinien zostać uruchomiony automatycznie po kliknięciu *Install* w kroku poprzednim. Czas instalacji zależy od parametrów komputera.

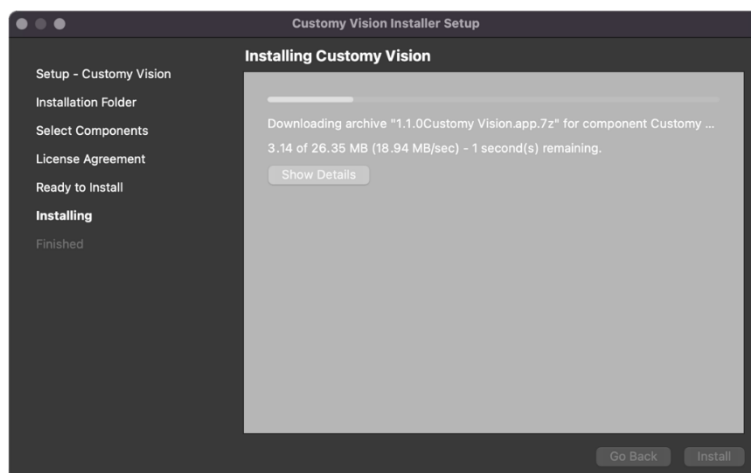

Zdjęcie 8. Krok 6: Instalacja – macOS

**Krok 7.** Koniec

Po zakończeniu instalacji, zostanie wyświetlona informacja o pomyślnie wykonanym procesie instalacji. Aby zamknąć okno instalatora kliknij *Done*.

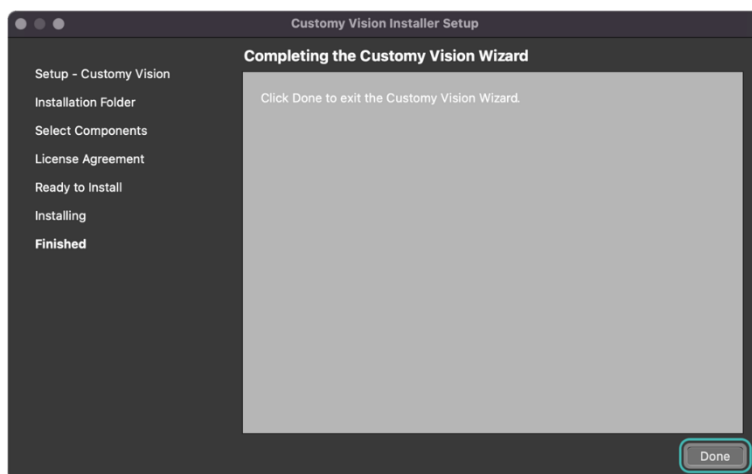


Zdjęcie 9. Step 7: Koniec – macOS

## 3.2. Weryfikacja procesu instalacji

### 1. Sukces instalacji

Proces instalacji zakończył się pomyślnie, gdy:

- Zakończono wszystkie korki w Asystencie Instalacji
- W wybranym folderze instalacyjnym oraz Launchpad powinna znajdować się aplikacja Customy Vision,
- Po uruchomieniu Customy Vision powinno pojawić się okno aplikacji (przedstawione poniżej).

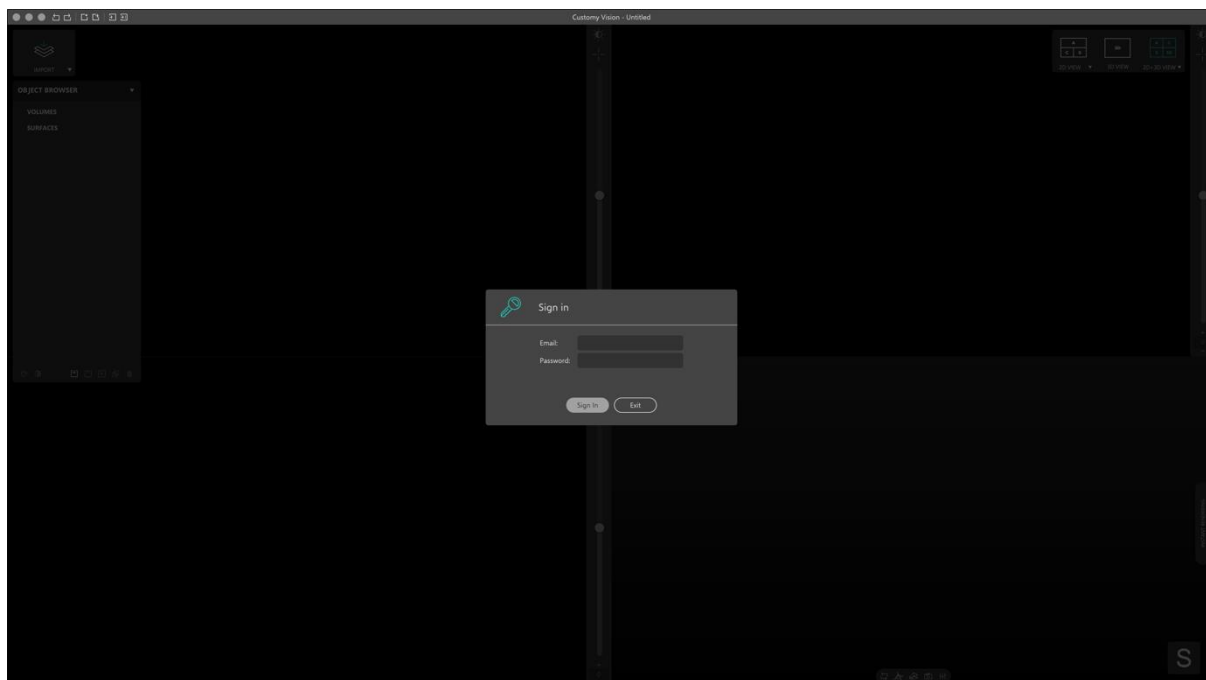

Zdjęcie 10. Okno Customy Vision – macOS



## 2. Niepowodzenie instalacji

Ewentualne niepowodzenie instalacji może być związane z posiadanym oprogramowaniem antywirusowym, ograniczonym dostępem użytkownika do partycji dysku urządzenia lub niewystarczającą ilością pamięci na instalację. Każdy przypadek ma swoje systemowe okno dialogowe informujące użytkownika, jaki problem powoduje przerwanie instalacji. Aby je rozwiązać, należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w oknie dialogowym.

W celu uzyskania szczegółowych informacji i obsługi klienta prosimy o kontakt pod adresem [support@customy.eu](mailto:support@customy.eu).

## 4. Instalacja w środowisku Windows

### 4.1. Proces instalacji


Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, jeśli chcesz zainstalować Customy Vision na systemie Windows.

#### 1. Pobierz plik instalacyjny

Aby rozpocząć, przejdź do podanego linku instalacyjnego i pobierz instalator Customy Vision. Domyślnie plik instalacyjny zostanie zapisany na komputerze w formacie .exe w folderze Downloads pod nazwą CustomyVisionSetup.exe. Aby uruchomić instalację, otwórz plik *CustomyVisionSetup.exe*.


#### 2. Komunikaty bezpieczeństwa

W zależności od ustawień bezpieczeństwa systemu Windows, podczas uruchomienia instalatora może pojawić się komunikat widoczny na Zdjęcie 11.

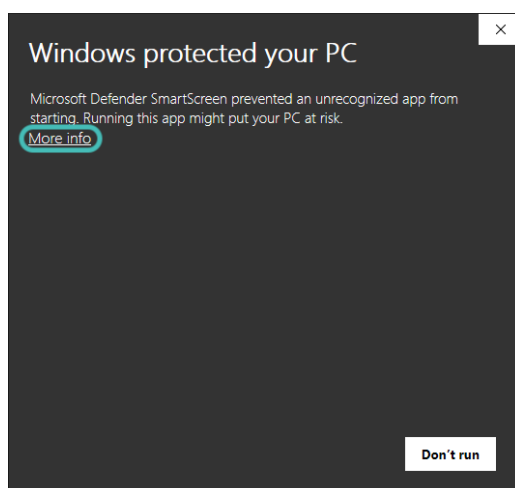

Zdjęcie 11. Komunikat bezpieczeństwa 1 – Windows

Jeśli komunikat ten pojawi się, kliknij *More info*, a następnie *Run anyway*, aby móc kontynuować instalację.

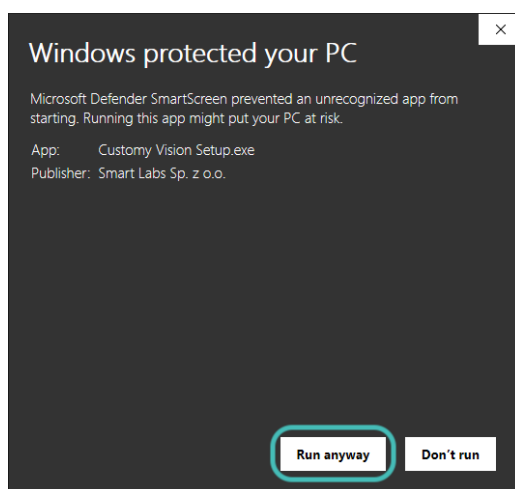


Zdjęcie 12. Komunikat bezpieczeństwa 2 – Windows

### 3. Asystent instalacji

Asystent instalacji Customy Vision powinien otworzyć się automatycznie. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować oprogramowanie:

#### Krok 1. Konfiguracja – Customy Vision


Gdy otworzy się okno *Customy Vision Installer Setup*, pokazane na Zdjęcie 13, kliknij *Next*.

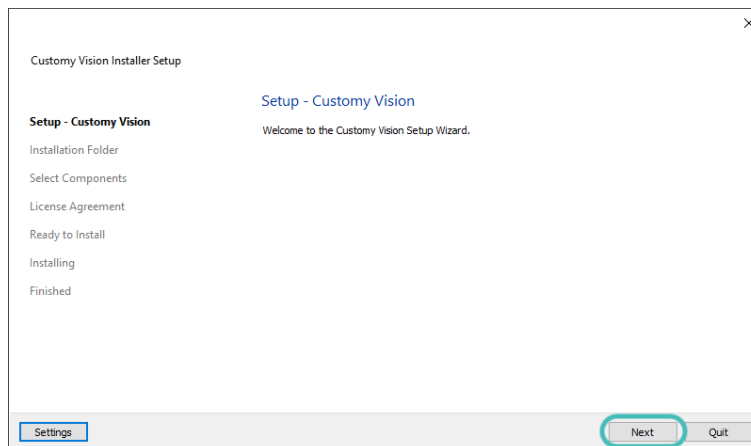

Zdjęcie 13. Krok 1: Konfiguracja – Customy Vision – Windows

#### Krok 2. Folder instalacji


W kroku tym należy wybrać miejsce instalacji Customy Vision. Domyślnie aplikacja zostanie zapisana w folderze `\Users\userName\AppData\Local\Customy`. W celu zmiany lokalizacji należy kliknąć *Browse* i wskazać określone miejsce i następnie kliknąć *Next*.

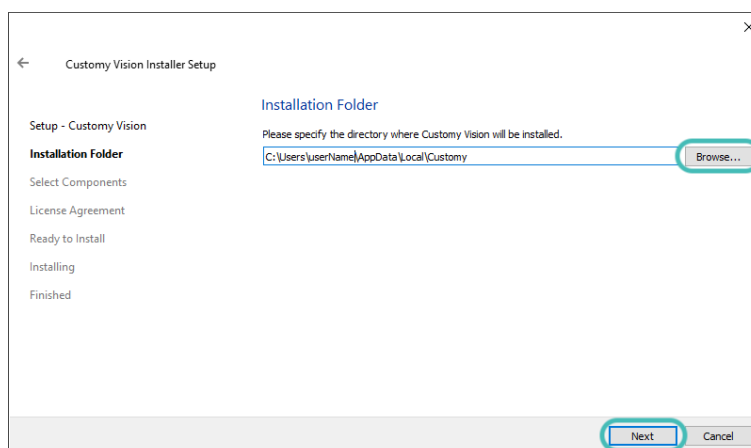

Zdjęcie 14. Krok 2: Folder instalacji – Windows

#### Krok 3. Wybierz elementy


W następnym kroku wyświetlone są wszystkie elementy, które zostaną zainstalowane. Kliknij *Next*, aby przejść do następnego kroku.

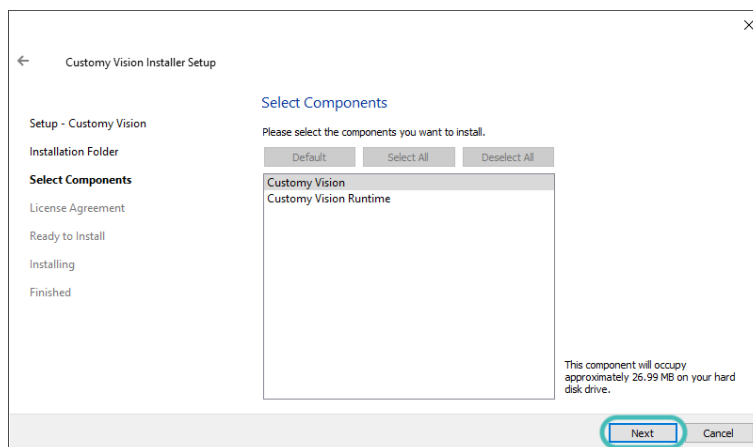

Zdjęcie 15. Krok 3: Wybór komponentów – Windows

#### Krok 4. Umowa licencyjna


Przeczytaj dokładnie *End-User Software License Agreement*. W celu zaakceptowania warunków umowy wybierz *I accept the license* i kliknij *Next*.

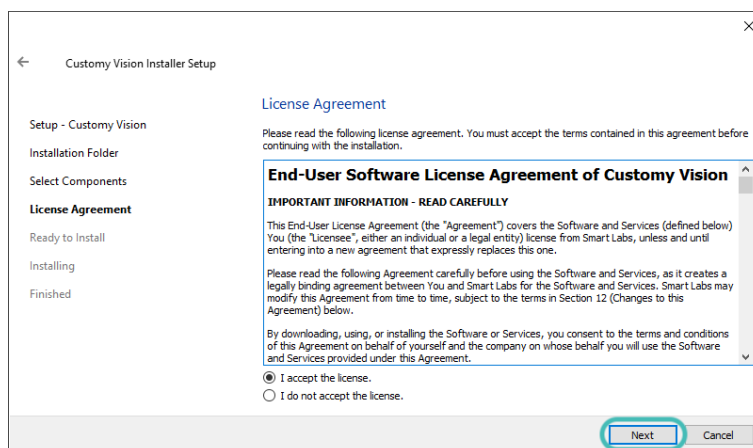

Zdjęcie 16. Krok 4: Umowa licencyjna – Windows

#### Krok 5. Gotowy do instalacji


W kroku tym wyświetlona zostanie wiadomość widoczna na Zdjęciu 17 informująca o gotowości instalacji oraz ilości pamięci jaka zostanie wykorzystana. Aby rozpocząć proces instalacji kliknij *Install*.

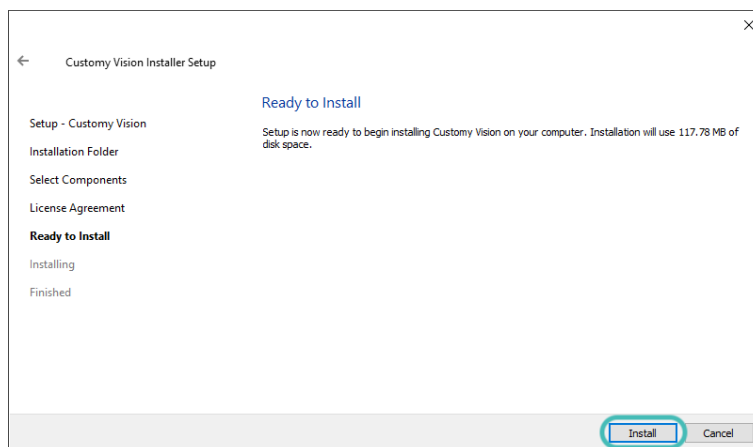

Zdjęcie 17. Krok 5: Gotowy do instalacji – Windows

### Krok 6. Instalacja


Proces instalacji powinien zostać uruchomiony automatycznie po kliknięciu *Install* w kroku poprzednim. Czas instalacji zależy od parametrów komputera.

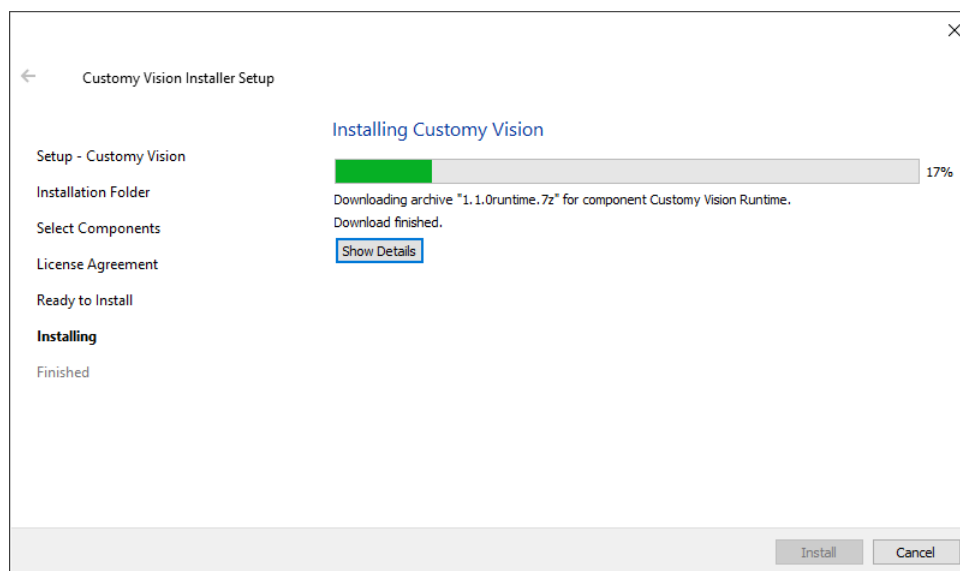

Zdjęcie 18. Step 6: Instalacja – Windows

### Krok 7. Zakończenie instalacji

Po zakończeniu instalacji, zostanie wyświetlona informacja o pomyślnie wykonanym procesie instalacji. Aby zamknąć okno instalatora kliknij *Finish*.

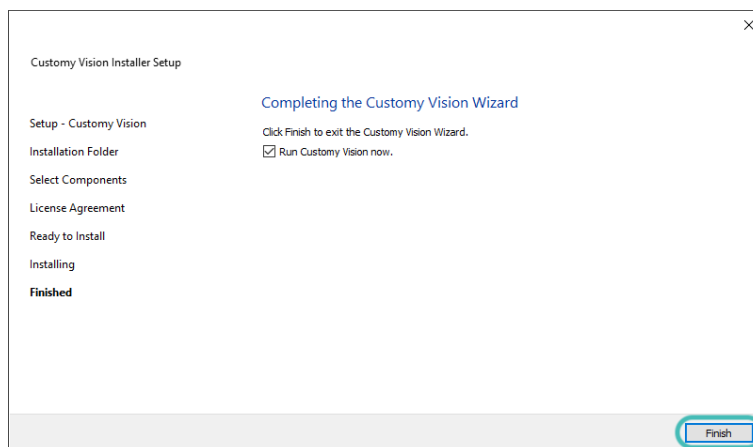


Zdjęcie 19. Krok 7: Koniec – Windows.

## 4.2. Weryfikacja procesu instalacji

### 1. Sukces instalacji

Proces instalacji zakończył się pomyślnie, gdy:

- Zakończone zostały wszystkie kroki w Asystencie Instalacji
- W wybranym folderze instalacyjnym powinna znajdować się aplikacja Customy Vision
- Po uruchomieniu Customy Vision powinno pojawić się okno aplikacji (przedstawione poniżej).

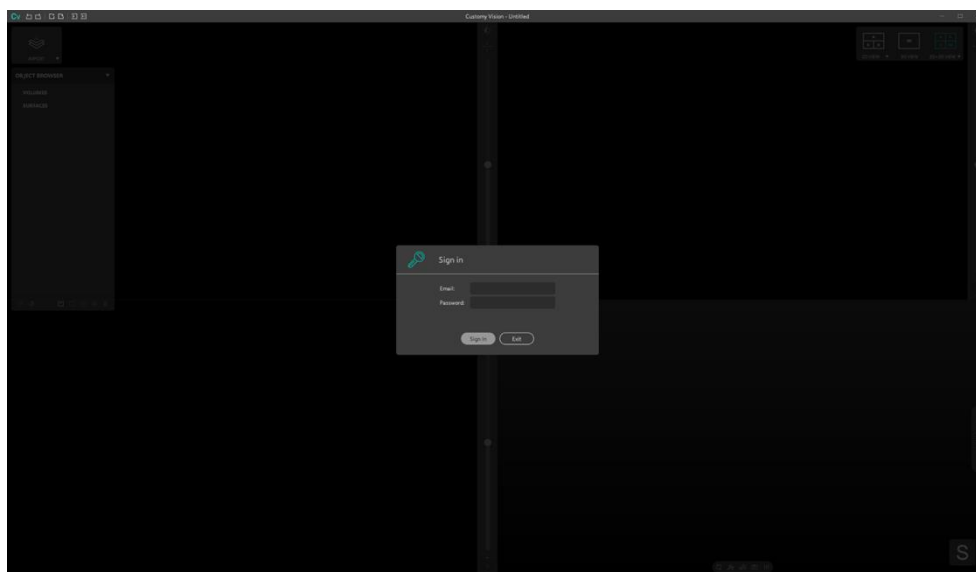

Zdjęcie 20. Okno Customy Vision – Windows

### 2. Niepowodzenie instalacji

Ewentualne niepowodzenie instalacji może być związane z posiadaniem oprogramowania antywirusowego, ograniczonym dostępem użytkownika do partycji dysku urządzenia lub niewystarczającą ilością pamięci na instalację. Każdy przypadek ma swoje systemowe okno dialogowe informujące użytkownika, jaki problem powoduje przerwanie instalacji. Aby je rozwiązać, należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w oknie dialogowym.

W celu uzyskania szczegółowych informacji i obsługi klienta prosimy o kontakt pod adresem [support@customy.eu](mailto:support@customy.eu).

## 5. Informacje dodatkowe

Instrukcja Instalacji Oprogramowania oraz Instrukcja Użycia Oprogramowania (IFU) dostępne są w wersji elektronicznej (plik PDF<sup>1</sup>) do pobrania na stronie internetowej [www.customy.eu](http://www.customy.eu).

Użytkownicy oprogramowania Customy Vision mogą bezpłatnie w ciągu 7 dni roboczych od dnia jego zgłoszenia, otrzymać wersje papierowe ww. dokumentów. W tym celu, należy wysłać wiadomość na adres [support@customy.eu](mailto:support@customy.eu).



Oprogramowanie Customy Vision nie jest przeznaczone do przetwarzania obrazów mammograficznych ze względu na sposób obrazowania w tym badaniu.



Środki ostrożności wymagane przez producenta są szczegółowo opisane w Instrukcji obsługi oprogramowania.



Oprogramowanie Customy Vision może być używane po dokładnym zapoznaniu się ze Instrukcją Użycia Oprogramowania (IFU) oraz Instrukcją Obsługi Oprogramowania (User Manual).



Wymagania techniczne dla oprogramowania Customy Vision są opisane w Instrukcji Użycia Oprogramowania (IFU).

---

<sup>1</sup> Odczyt plików PDF zapewnia oprogramowanie Adobe Acrobat Reader